

CardioChip®

Contenido del Kit

- 1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra
- 1 Documento de instrucciones
- 1 Documento de consentimiento informado F-1638
- 1 Documento de recogida de datos F-1639
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

Nº Análisis

Instrucciones



1

Lea y cumplimente los documentos de consentimiento informado y de recogida de datos. En este último formulario hay unos campos de cumplimentación obligatoria que requieren resultados de analíticas y datos médicos recientes (inferiores a 6 meses).




2

No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra. Cada escobillón debe ser utilizado por una sola persona y cada participante debe aportar dos escobillones con sus muestras.



3

Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 10 veces cada lado. A continuación, colóquelo dentro del tubo y ciérrelo.

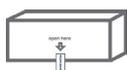

4

Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis y recogida de datos debidamente cumplimentados así como el consentimiento informado firmado. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



5

Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en “¿Quiere devolver el Kit?”:
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



6

Le avisaremos por e-mail cuando hayamos recibido la muestra y usted podrá seguir el estado de su pedido en todo momento en laboratorioechevarne-shop.com