

# Detección de Drogas

## Contenido del Kit

- 1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra
- 1 Colector de saliva
- 1 Documento de instrucciones F01702
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit


Nº Análisis

## Instrucciones




1

No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra. Para facilitar la segregación de saliva, realice un pequeño masaje externo en los carrillos.

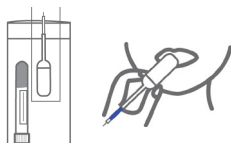

2

Abra el envoltorio, coloque el colector de saliva debajo de la lengua y cierre la boca hasta que vea que el indicador se vuelve de color azul (esto sucederá transcurridos unos minutos).

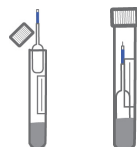

3

Abra el tubo contenedor en posición vertical e introduzca el colector de saliva con el indicador hacia arriba. Cíérrele ajustando el tapón a presión.



4

**Introduzca la muestra en el kit, junto al documento de solicitud de análisis.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



5

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 671 341 408)**, en horario de **9 a 14 / 16 a 19 horas**, indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



6

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: [laboratorioechevarne.com](http://laboratorioechevarne.com)