


Test de Estrés

Contenidos del Kit

- 4 tubos etiquetados con almohadilla cilíndrica en el interior para la recogida de muestra.
- Cada tubo va adaptado a otro de mayor tamaño y forma icónica.
- 1 Sobre de plástico con cierre hermético para introducir los tubos.
- 1 Documento de instrucciones F-1684.
- 1 Documento de solicitud de análisis.
- 1 Precinto de seguridad.

Nº Análisis

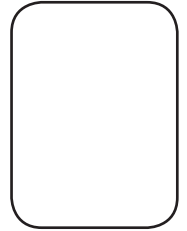

Horarios de toma de muestra

No tome ningún alimento o bebida en la hora previa a la toma de muestra. Tampoco se lave los dientes ni utilice ningún colutorio para enjuagarse la boca.

Tubo 1 → 8 h / Tubo 2 → 12 h / Tubo 3 → 16 h / Tubo 4 → 24 h

Instrucciones



1


Se ha de tomar la muestra de las 8 de la mañana antes de lavarse los dientes y desayunar. Para la toma del resto de muestras, ha de enjuagarse la boca con agua 15 minutos antes y a partir de este momento no haber ingerido nada (ni alimentos ni bebidas) hasta la toma de la muestra de saliva.



2

Destape el tubo correspondiente (1, 2, 3 o 4) según la hora, y, con las manos limpias y la punta de los dedos, retire la almohadilla cilíndrica. Introdúzcala en la boca, manténgala de 1 a 2 minutos por debajo de la lengua y los laterales.

Asegúrese que la almohadilla está totalmente empapada de saliva. En caso de no contar con el volumen suficiente de muestra, el Laboratorio no podrá analizarla.

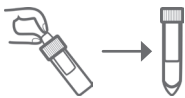

3

Vuelva a poner la almohadilla cilíndrica (empapada de saliva) en el tubo pequeño. Tápele e introdúzcalo en el tubo grande, ajustándolo bien.



4

Conserve el tubo refrigerado después de cada recogida y al finalizar, introduzca las muestras en el sobre de plástico y éste en el kit, junto al documento de solicitud de análisis.



5

Coloque la muestra en el kit junto al documento de solicitud de análisis. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



6

Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en "¿Quiere devolver el Kit?":
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



7

Le avisaremos por e-mail cuando hayamos recibido la muestra y usted podrá seguir el estado de su pedido en todo momento en laboratorioechevarne-shop.com