

Huella Genética

Contenido del kit	nº Análisis
2 Escobillones identificados para la recogida de muestra 1 Sobre de plástico con cierre hermético para introducir los dos escobillones 1 Documento de instrucciones (F01700) 1 Documento de consentimiento informado (F01414) 1 Precinto de seguridad 1 Albarán de envío 1 Sobre de retorno del kit	

INSTRUCCIONES

**1**

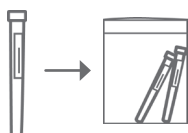
Lea y cumplimente el documento de consentimiento informado.

**2**

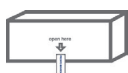
No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra. Cada escobillón debe ser utilizado por una sola persona y cada participante debe aportar dos escobillones con sus muestras.

**3**

No toque con las manos el extremo que tiene el algodón. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 20 veces cada lado.

**4**

Deje secar el escobillón 10 minutos sin que entre en contacto con nada. Una vez seco, introdúzcalo en el tubo correspondiente y ciérrelo. Repita el proceso con el otro escobillón (se deben tomar dos muestras). Al finalizar, introduzca los dos tubos en el sobre de plástico.

**5**

Introduzca las muestras en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis y de consentimiento informado firmado. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.

**6**

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 671 341 408)**, en horario de **9 a 14 / 16 a 19 horas**, indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**

**7**

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**