

IA **200** | Intolerancia Alimentaria

Nº Análisis

**Contenido del Kit**

- 1 Lanceta automática
- 1 Papel absorbente
- 1 Documento de instrucciones F-1807
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit




**1** Lea detenidamente estas instrucciones.



**2** Lávese las manos con agua y jabón y aclare abundantemente con agua. Desinfecte la yema del dedo anular con alcohol y deje secar la piel.




**3** Gire el cabezal verde de la lanceta y retírelo. A continuación, tense la zona a pinchar y pínchela.

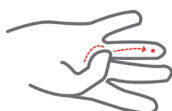

**4** Realice un masaje en el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota grande de sangre.

*No apriete la zona que rodea el lugar de punción.*

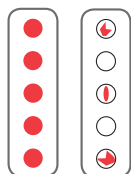

**5** Haga caer 5 gotas de sangre en un círculo. Repita el proceso cuatro veces más hasta rellenar cinco círculos.


*Compruebe que la sangre ha llenado todo el círculo y que ha traspasado completamente la cara posterior del círculo.*



**6** Deje secar completamente la sangre a temperatura ambiente (2 horas).



**7** Coloque la muestra en el kit junto al documento de solicitud de análisis. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.

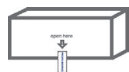

**8** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS:



- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en “¿Quiere devolver el Kit?”:  
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



**9** Le avisaremos por e-mail cuando hayamos recibido la muestra y usted podrá seguir el estado de su pedido en todo momento en [laboratorioechevarne-shop.com](http://laboratorioechevarne-shop.com)