



## Intolerancia Alimentaria

Nº Análisis

### Contenido del Kit


- 1 Lanceta automática
- 1 Papel absorbente
- 1 Documento de instrucciones F01807
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit




**1** Lea detenidamente estas instrucciones.



**2** Lávese las manos con agua y jabón y aclare abundantemente con agua. Desinfecte la yema del dedo anular con alcohol y deje secar la piel.

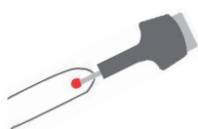

**3** Gire el cabezal verde de la lanceta y retírelo. A continuación, tense la zona a pinchar y pínchela.

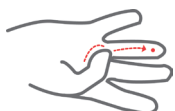

**4** Realice un masaje en el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota grande de sangre.

*No apriete la zona que rodea el lugar de punción.*



**5** Deposite 1 gota de sangre en cada círculo. Repita el proceso hasta rellenar los 5 círculos.



*Compruebe que la sangre ha llenado todo el círculo y que ha traspasado completamente la cara posterior del círculo.*



**6** Deje secar completamente la sangre a temperatura ambiente (2 horas).



**7** Coloque la muestra en el kit junto al documento de solicitud de análisis. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



**8** Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 934 578 866)**, pulsando **nº 9** e indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



**9** Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: [laboratorioechevarne.com](http://laboratorioechevarne.com)