

# NutriChip®

Contenido del kit	n° Análisis
1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra 1 Documento de instrucciones (F02071) 1 Documento de consentimiento informado (F02074) 1 Precinto de seguridad 1 Albarán de envío 1 Sobre de retorno del kit	

## INSTRUCCIONES




**1** Lea y cumplimente el documento de consentimiento informado.



**2** No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



**3** Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 10 veces cada lado. A continuación, colóquelo dentro del tubo y ciérrelo.

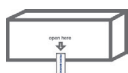

**4** **Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentado así como el consentimiento informado firmado.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



**5** Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 934 578 866)**, pulsando **n° 9** e indicando **n° de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



**6** Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**