

# Test de Paternidad

## Contenido del Kit

- 2 Escobillones identificados por participante para la recogida de muestra
- 1 Sobre de plástico con cierre hermético para introducir los escobillones
- 1 Documento de instrucciones
- 1 Documento de consentimiento informado F01405
- 2 Etiquetas de identificación por participante
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

Nº Análisis

## Instrucciones



1

Lea detenidamente, cumplimente y firme el documento de consentimiento informado.




2

No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra. Cada escobillón debe ser utilizado por una sola persona y cada participante debe aportar dos escobillones con sus muestras.




3

No toque con las manos el extremo que tiene el algodón. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 20 veces cada lado.

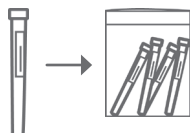

4

Deje secar el escobillón 10 minutos sin que entre en contacto con nada. Una vez seco, introdúzcalo en el tubo correspondiente (Padre/hijo...) y ciérrelo. Repita el proceso con el otro escobillón (se deben tomar dos muestras por cada participante). Al finalizar, introduzca todos los tubos en el sobre de plástico.

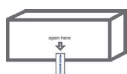

5

**Introduzca las muestras en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis y de consentimiento informado firmado.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



6

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 671 341 408)**, en horario de **9 a 14 / 16 a 19 horas**, indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



7

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: [laboratorioechevarne.com](http://laboratorioechevarne.com)