

Microbioma Intestinal

Contenido del Kit

- 1 Dispositivo de recogida de heces
- 1 Guante desechable
- 1 Gasa elástica *Fe-col* para ayudar con la recogida de las heces.
- 1 Documento de instrucciones de uso F-2064
- 1 Documento de recogida de datos F-2009

Nº Análisis

Instrucciones




1

Levantar la parte de la caja donde descansa el tubo, con ayuda de las pestañas, y sacar el Fe-col y los guantes.




2

Intentar orinar antes de hacer la toma de la muestra porque la orina interfiere negativamente en los resultados de los análisis.

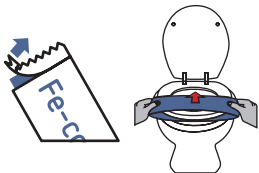

3

Abrir el envoltorio del Fe-col y colocarlo en el WC según instrucciones descritas en el adjunto.

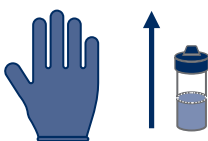

4

Colocarse los guantes. Sacar el tubo y colocar en posición vertical en la ranura que contiene la caja en la parte superior derecha.



5

Sentarse en el WC con el Fe-col colocado y defecar sobre el Fe-col.




6

Abrir el tubo y usando la espátula que está insertada en la tapa del tubo coger una cantidad de muestra de tamaño similar a un guisante.




7

Introducir la espátula en el tubo y cerrar bien el tubo. Agitar para disolver la muestra en el líquido que hay en el interior del tubo.

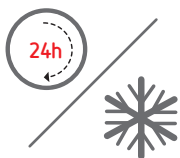

8

- Conservar el tubo con la muestra a 4°C si el tiempo será **menor de 24 h.**
- Congelar el tubo con la muestra si el tiempo será **mayor a 24 h.**

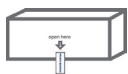

9

Introduzca las muestras en el kit junto al documento de Solicitud de datos. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



10

Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en “¿Quiere devolver el Kit?”:
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes.**



11

Le avisaremos por e-mail cuando hayamos recibido la muestra y usted podrá seguir el estado de su pedido en todo momento en laboratorioechevarne-shop.com