

# Toma de muestra con hisopo

## Contenido del Kit

- 1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra
- 1 Documento de instrucciones
- 1 Documento de consentimiento informado F-1053
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

## Nº Análisis

## Instrucciones



1

Lea y cumplimente los documentos de consentimiento informado y de recogida de datos. En este último formulario hay unos campos de cumplimentación obligatoria que requieren resultados de analíticas y datos médicos recientes (inferiores a 6 meses).



2

No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



3

Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 10 veces cada lado. A continuación, colóquelo dentro del tubo y ciérrelo.



4

**Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentado así como el consentimiento informado firmado.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



5

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 934 578 866)** indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

\* Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.

\*\* El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.



6

Le avisaremos por e-mail cuando hayamos recibido la muestra y usted podrá seguir el estado de su pedido en todo momento en [echevarne-shop.com](http://echevarne-shop.com)