

SportChip®

| Contenido del kit | n° Análisis |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra 1 Documento de instrucciones (F02084) 1 Documento de consentimiento informado (F02075) 1 Precinto de seguridad 1 Albarán de envío 1 Sobre de retorno del kit | |

INSTRUCCIONES




1 Lea y cumplimente el documento de consentimiento informado.



2 No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



3 Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 10 veces cada lado. A continuación, colóquelo dentro del tubo y ciérrelo.

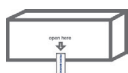

4 **Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentado así como el consentimiento informado firmado.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



5 Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 934 578 866)**, pulsando **n° 9** indicando **n° de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



6 Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**