

# SportChip®

Contenido del kit	n° Análisis
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra</li> <li>1 Documento de instrucciones (F-2084)</li> <li>1 Documento de consentimiento informado (F-2075)</li> <li>1 Precinto de seguridad</li> <li>1 Albarán de envío</li> <li>1 Sobre de retorno del kit</li> </ul>	

## INSTRUCCIONES




**1** Lea y cumplimente el documento de consentimiento informado.



**2** No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



**3** Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 10 veces cada lado. A continuación, colóquelo dentro del tubo y ciérrelo.

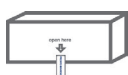

**4** **Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentado así como el consentimiento informado firmado.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



**5** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS, indicando n° de abonado **4331**:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en "¿Quiere devolver el Kit?":  
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



**6** Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**