

Test Detección COVID-19 | PCR EN SALIVA

Contenido del kit

- 1 Material recogida de muestra
- 1 Contenedor de seguridad
- 1 Hoja de instrucciones (F02141)
- 1 Resguardo de recogida con nº de análisis
- 1 Hoja solicitud de análisis (a cumplimentar por el paciente y devolver con el kit) (F02142)
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

**1**

Lea y cumplimente la hoja de solicitud de análisis con los datos del paciente que realice la toma de muestra.

Los datos personales van asociados a un número de análisis que los relaciona con cada muestra. En caso de enviar más de una muestra, realice los envíos de forma independiente (1 muestra por caja) identificando bien los datos personales con el código de la muestra enviada (ver números en las etiquetas y evitar intercambiar numeraciones).

**2**

Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra.

**3**


No debe comer, fumar, mascar chicle ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.

**4**

Enjuague su boca con agua y espere 10 minutos.

**5**

Frote sus mejillas y paladar con la lengua para estimular la secreción de saliva.

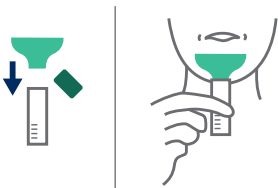**6**


Coloque el embudo en el tubo de recolección de saliva vacío. Escupa la saliva en el embudo hasta que el líquido (sin incluir burbujas) alcance la línea de 1ml en el tubo de recolección.

IMPORTANTE: Sólo saliva, ni moco ni esputo (si hay un exceso de burbujas elimínelas por medio de golpes suaves del tubo en una superficie dura).

**7**


Quite el tapón rojo del tubo con la solución conservadora.

PRECAUCIÓN: manipule con cuidado, el líquido es tóxico.

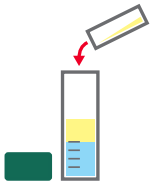

8

Añada la solución conservadora al tubo de recolección que contiene la saliva.

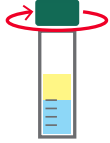

9

Cierre firmemente el tubo de recolección de saliva.




10

Agite durante 15 segundos para mezclar.



11

Conserve la muestra temperatura ambiente.

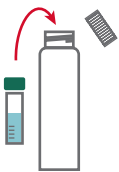

12

Antes de trasladar la muestra, deposite el tubo con la muestra en el contenedor de seguridad facilitado y ciérrelo.



13

Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentado.

IMPORTANTE: Devolver la hoja de solicitud (F02142) con los datos del paciente y conservar el resguardo de recogida.



14

Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en "¿Quiere devolver el Kit?":
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



15

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**