

Test Vitaminas y Suplementos

Contenido del kit	n° Análisis
<ul style="list-style-type: none"> 1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra 1 Documento de instrucciones (F-2160) 1 Documento de consentimiento informado (F-2161) 1 Precinto de seguridad 1 Albarán de envío 1 Sobre de retorno del kit 	

INSTRUCCIONES




1 Lea y cumplimente el documento de consentimiento informado.



2 No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



3 Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 10 veces cada lado. A continuación, colóquelo dentro del tubo y ciérrelo.

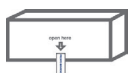

4 **Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentado así como el consentimiento informado firmado.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



5 Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS, indicando n° de abonado **4331**:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en "¿Quiere devolver el Kit?":
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



6 Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**