

Instrucciones para la toma de muestra para la realización de la prueba

NutriChip®

Contenido del kit	nº Análisis
1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra 1 Documento de instrucciones (F02071) 1 Documento de consentimiento informado (F02074) 1 Precinto de seguridad 1 Albarán de envío 1 Sobre de retorno del kit	

INSTRUCCIONES


1

Lea y cumplimente el documento de consentimiento informado.


2


No se debe comer, fumar, cepillar los dientes, mascar chicle ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



GFX-02

3

Lea detenidamente las instrucciones de toma de muestra (documento GFX-02) para la recogida de muestra.

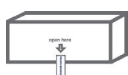
4

Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentados así como el consentimiento informado firmado. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.


5


Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 671 341 408)**, en horario de **9 a 14 / 16 a 19 horas**, indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



6

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**


No coma, beba, fume, se cepille los dientes ni mastique chicle durante 30 minutos antes de su uso.
Verifique que el nivel de líquido esté en la línea de 4 ml antes de abrir.

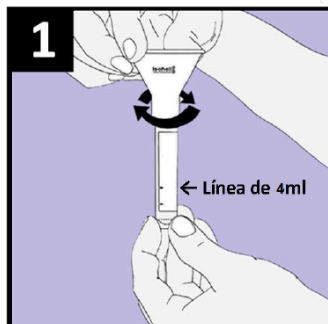


1. Retire la tapa del tubo.
 Guarde la tapa para uso posterior.
 Enrosque el embudo de recogida en el tubo.

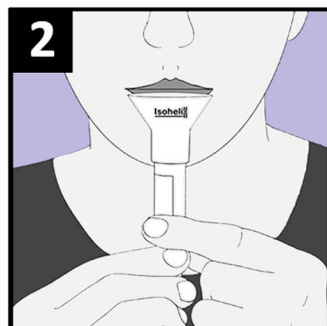

2. Escupir en el embudo hasta que el nivel del líquido en el tubo, excluyendo burbujas, **alcance la línea de 4 ml.**
 El depósito de saliva puede tardar entre 2 y 5 minutos.

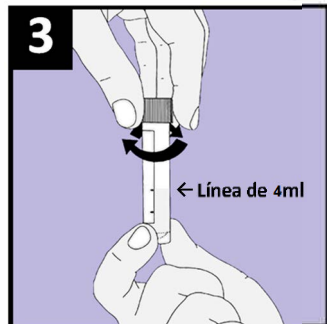

3. Desenrosque el embudo de recolección y vuelva a colocar la tapa del tubo.
 Desechar el embudo.

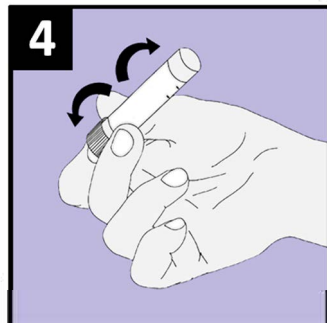

4. Agite el tubo colector varias veces para mezclar la saliva con la solución.

MANTENER A TEMPERATURA AMBIENTE DESPUES DE LA TOMA DE MUESTRA

Precauciones: no ingerir. Si la solución estabilizadora entra en contacto con la piel o los ojos, lávese abundantemente con agua. La tapa del tubo puede representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.