

Instrucciones para la toma de muestra para la realización de la prueba

# SportChip®

| Contenido del kit                                                                                                                                                                                                                                                                | n° Análisis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra<br><b>1</b> Documento de instrucciones (F02084)<br><b>1</b> Documento de consentimiento informado (F02075)<br><b>1</b> Precinto de seguridad<br><b>1</b> Albarán de envío<br><b>1</b> Sobre de retorno del kit |             |

## INSTRUCCIONES


**1**

Lea y cumplimente el documento de consentimiento informado.


**2**

No se debe comer, fumar, cepillar los dientes, mascar chicle ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



GFX-02

**3**

Lea detenidamente las instrucciones de toma de muestra (documento GFX-02) para la recogida de muestra.


**4**

**Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis debidamente cumplimentados así como el consentimiento informado firmado.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.


**5**

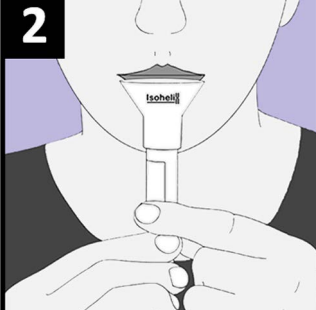
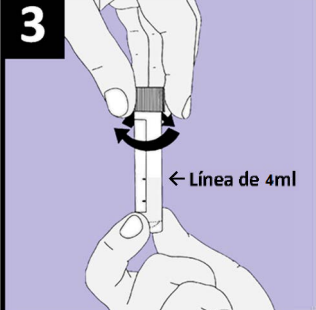
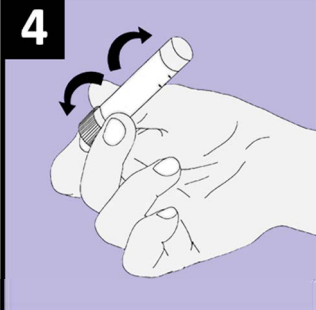
Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 671 341 408)**, en horario de **9 a 14 / 16 a 19 horas**, indicando **n° de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**


**6**

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**

**No coma, beba, fume, se cepille los dientes ni mastique chicle durante 30 minutos antes de su uso.**  
**Verifique que el nivel de líquido esté en la línea de 4 ml antes de abrir.**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>1.</b> Retire la tapa del tubo.<br/>         Guarde la tapa para uso posterior.<br/>         Enrosque el embudo de recogida en el tubo.</p>                                                     |
|   | <p><b>2.</b> Escupir en el embudo hasta que el nivel del líquido en el tubo, excluyendo burbujas, <b>alcance la línea de 4 ml.</b></p> <p>El depósito de saliva puede tardar entre 2 y 5 minutos.</p> |
|  | <p><b>3.</b> Desenrosque el embudo de recolección y vuelva a colocar la tapa del tubo.<br/>         Desechar el embudo.</p>                                                                           |
|  | <p><b>4.</b> Agite el tubo colector varias veces para mezclar la saliva con la solución.</p> <p><b>MANTENER A TEMPERATURA AMBIENTE DESPUES DE LA TOMA DE MUESTRA</b></p>                              |

**Precauciones: no ingerir.** Si la solución estabilizadora entra en contacto con la piel o los ojos, lávese abundantemente con agua. La tapa del tubo puede representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.